

**UW**  
HEALTHCARE

**UWHM SDN. BHD.**

PMT 790, Jalan Cassia Selatan 5/2,  
Taman Perindustrian Batu Kawan,  
Bandar Cassia, Pulau Pinang,  
14110, Malaysia.  
Tel: +(604) 585 5229  
Email: humidifier@uw-healthcare.com

 **Výhradní dodavatel pro ČR a SK**

POLYMED medical CZ, a.s.  
Petra Jilemnického 14/51,  
503 01 Hradec Králové  
tel.: +420 495 220 206  
e-mail: obchod@polymed.cz  
www.polymed.eu

**EC REP Obelis s.a.**

Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-mail : mail@obelis.net

**Data  
Matrix**

(01) 19555768100659  
(17) YYMMDD  
(10) LN-XXXX

**MADE IN MALAYSIA**

**NÁVOD K POUŽITÍ IFU-002 (R0)**



Odstraňte zátku adaptéru.



Nainstalujte kompletní adaptér do konektoru adaptéru a otáčejte po směru hodinových ručiček.



Připojte kompletní adaptér k průtokoměru. Otáčejte proti směru hodinových ručiček.



Odstraňte konektor kyslíkové hadičky.



Připojte kyslíkovou hadičku ke konektoru kyslíkové hadičky.



Pokud hadici nepoužíváte, zavřete ji stisknutím krytu.



# HYDROX

## HYDROX ZVLHČOVAČ / PŘEDNAPLNĚNÝ ZVLHČOVAČ

### SLOŽENÍ :

Sterilní respirační roztok

- Bez antimikrobiálních činidel
- Bez účinných látek
- Žádné další přidané látky

**500 ML**

**REF P 08400**

### VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ :

- Doba použití po otevření: 35 dnů
- Využití průtoku: 1L/min-15L/min
- Nepoužívejte, jestliže je obal poškozený
- Před použitím nejprve zkontrolujte obal
- Tento výrobek smí být používán pouze lékaři, zdravotnickým personálem nebo vyškolenými osobami

