

Systém BactiClear

Objednací čísla:

P 04643, P 04758, P 05751, P 05752, P 05639,
P 06119, P 06120, P 06215

Řada vaků BactiClear byla navržena pro bezpečný sběr a likvidaci odpadních tekutin. Přístupné části byly ošetřeny stříbrným biocidem testovaným podle ISO 22196: 2011.

Určené použití

Vaky VacSax jsou určeny pro bezpečné shromažďování a likvidaci odpadních tekutin, a pro použití pouze vyškoleným personálem.

Likvidace

S obsahem se musí zacházet jako s potenciálně nebezpečným a je třeba ho likvidovat podle místních, národních nebo nemocničních postupů.

Upozornění

Před použitím zkontrolujte, že výrobek není po expiraci. Datum je vytištěné na výrobku a na štítku obalu.

Jakmile je připojen vak, kontrolujte pravidelně podtlak a průtok.

Vyvarujte se nakládání nádoby, může dojít k předčasnému uzavření a poskytnutí chybného údaje o objemu.

Údaj o objemu na tomto zařízení je pouze referenční.



Vaky VacSax jsou navrženy pro jedno použití, a proto je nelze účinně dekontaminovat, v opačném případě hrozí riziko křížové kontaminace nebo infekce.

Ventil s filtrem podléhá nevratné přeměně,

jakmile je namočen a nemůže být znovu použit.

Při použití výrobků VacSax s jiným zařízením se ujistěte, že jste si přečetli všechny příslušné pokyny k použití.

Instalace

1 Před použitím zkontrolujte správnou velikost nádoby pro použitý vak.
Zkontrolujte, že je pevná nádoba/lahev čistá - v případě potřeby otřete povrch vnitřního okraje vlhkým hadříkem. Pokud používáte 3litrový vak, je potřeba zvolit správnou soupravu hadic. (č. 9910-353)
Při použití vaku se vzorkovacím portem zkontrolujte, že je velká žlutá zátka portu zatlačena pevně dolů.

2 Vložte vak do pevné nádoby a pevně zatlačte.

3 Otáčivým pohybem nasadte kuželový konektor podtlakové hadice z regulátoru podtlaku na port podtlaku. Zapněte odsávání a nastavte na maximum pro nafouknutí vaku. Nastavte požadovanou úroveň podtlaku. Vak vyměňte, jestliže se vak nepodaří nafouknout nebo není dosaženo požadované úrovně podtlaku.

4 Připojte patientskou hadici a zkontrolujte, že je v patientské hadici podtlak.

Po použití


DŮLEŽITÉ! Při odpojování patientské hadice nevypínejte zdroj vakua.

5 Odpojte patientskou hadici a na port nasadte zátku. Otočením odpojte připojení podtlaku. **ZA HADICI NETAHEJTE.**

6 Pomocí úchytů vyjměte vak z nádoby.

Pokud dojde během používání ke kontaminaci, podtlakovou hadici zlikvidujte.

Při použití vaku se vzorkovacím portem zkontrolujte, že je zátka portu po použití zpět pevně zatlačena.

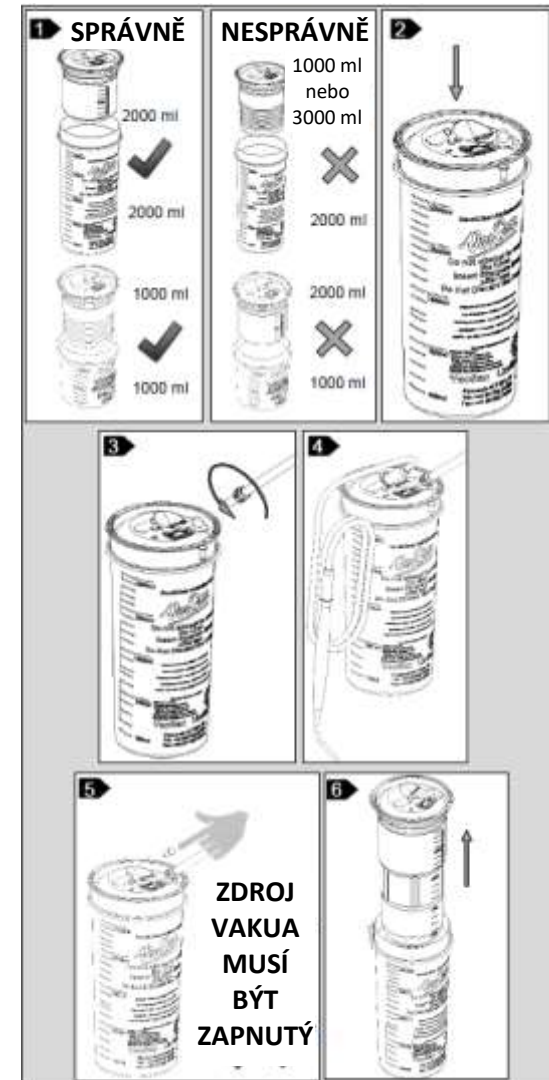

Návod pro kaskádové vaky

Se stojanem kaskádového systému lze použít až osm 3 litrových vaků poskytující celkový objem systému přibližně 24 litrů.

Zapojení a použití:

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny, věnujte zvláštní pozornost upozorněním a zvláštním opatření - která jsou označena



Před použitím zkontrolujte, že výrobek není po expiraci. Datum je vytištěno na výrobku a na štítku obalu.

Instalace kaskádového systému



Ujistěte se, že jste seznámeni s instalací standardních vaků (viz první strana) a přečetli jste si návod k použití dodaný se soupravou hadice.

- Zkontrolujte, že všechna připojení nádob jsou propojená a těsná.
- Umístíte horní černý vak do láhve nejbližší k regulátoru podtlaku.

1

- Umístíte požadovaný počet modrých horních kaskádových vaků (až 7) do zbývajících lahví, postupně od černého horního vaku.

2

- Od zdroje podtlaku připojte odsávací hadici s kuželovým konektorem do odsávacího otvoru černého horního vaku.
- Pomocí kaskádové hadice, připojte port pacienta černého horního vaku k portu podtlaku prvního modrého vaku.
- Pomocí kaskádové hadice, připojte port pacienta prvního modrého vaku k portu podtlaku druhého modrého vaku, pokračujte, dokud není dosaženo posledního vaku. Připojte hadici pacienta k portu

3


- pacienta tohoto vaku.
- Zapněte podtlakový regulátor a nastavte maximální úroveň vakua, vaky se nafouknou,
- Zkontrolujte, že je v patientské hadici přítomen podtlak, rukou uzavřete konec patientské hadice.



Vizuálně zkontrolujte, že jsou všechny vaky zcela nafouknuté.

Kontroly před použitím

- Zkontrolujte, že jsou všechny vaky pevně zatlačeny do lahví.
- Zkontrolujte, že jsou všechny konektory hadic pevně zatlačeny na porty pacienta a podtlaku.

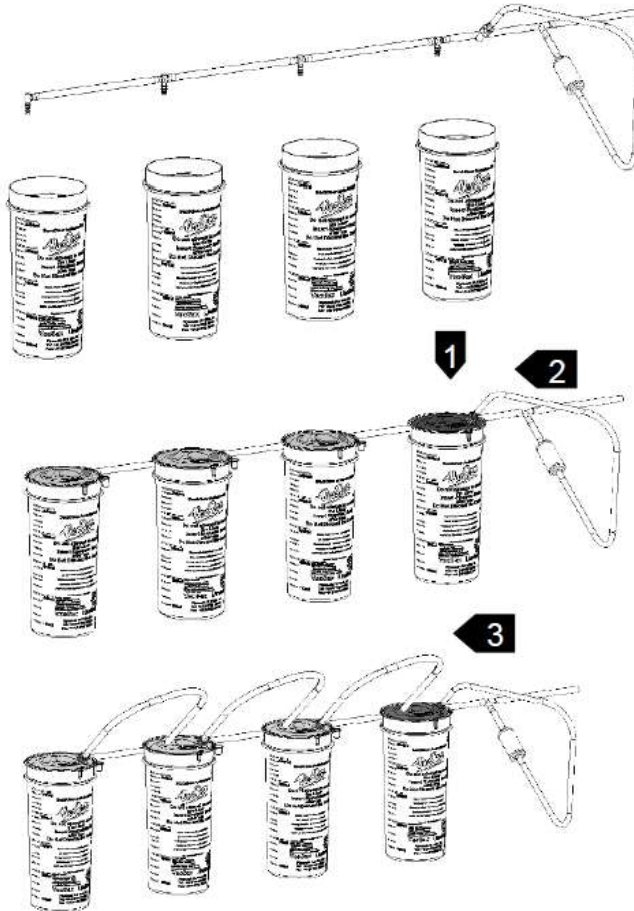

Po použití



DŮLEŽITÉ! Při odpojování systému nevypínejte zdroj vakua!

- Začněte od vaku s připojenou patientskou hadicí; odpojte patientskou hadici od patientského portu. Sejměte malý uzávěr patientského portu z vnějšího okraje víčka vaku, otáčením se odpojíte.
- Zatlačte tento uzávěr pevně na patientský port. Odpojte kaskádovou hadici od portu vakua vaku otáčením kuželového konektoru, hadici NETAHEJTE, pevně zatlačte velký žlutý uzávěr na port, ventil před vyjmutím vaku zavřete.
- Pomocí úchytů na boku víka opatrně vyjměte použitý vak z láhve - v souladu s nařízením nemocnice
- Opakujte, dokud není dosaženo černého horního vaku.

Likvidace

Uživatelé produktů VacSax by si měli uvědomit potenciální riziko kontaminace, a musí být seznámeni s vnitrostátními, místními a nemocničními postupy pro likvidaci potenciálně kontaminovaných tekutin a součástí.

VacSax dodává gelující činidlo, zásobníky a kartony pro bezpečnou likvidaci použitých vaků a hadic.

Čištění stojanu

Pokud byl stojan kontaminován, odstraňte všechny hadice a konektory a zlikvidujte v souladu s postupy nemocnice. Stojan vyčistěte dezinfekčními prostředky na vodní bázi, po čištění důkladně osušte.

Plastové materiály se mohou rozkládat, pokud jsou vystaveny delší dobu UV záření - pravidelně kontrolujte funkčnost vaku a vyměňte, pokud víčko vykazuje známky poškození.

Výrobce:

VacSax Limited
Western Wood Way
Langage Science Park
Plymouth PL7 5BG, UK